



TECHNIMOUNT
MEDICAL®

CHARIOT NÉONATAL THS™

GUIDE D'UTILISATION

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT



Droits d'auteur

Droits d'auteur 2024 Technimount Medicale Inc. est une société affiliée de Technologies CGC Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, sauvegardée dans un système de récupération, traduite dans une langue quelconque, modifiée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de Technimount ou de ses sociétés affiliées.

Marques de commerce

Les noms des fabricants de produits et d'appareils médicaux sont des marques de commerce^{MC} ou des marques déposées^{MD} de leurs détenteurs respectifs.

- Technimount Medical® est une marque déposée de Technologies CGC Inc.
- THS™ est une marques de commerce de Technologies CGC Inc.
- Babyleo® est une marque déposée de Dräger.
- Babyroo® est une marque déposée de Dräger.
- Serres® est une marque déposée de Serres Inc.

Pour tout problème avec votre produit Technimount, ses composants ou pour toute question technique pendant l'installation, l'utilisation ou la maintenance, communiquer avec le soutien technique à l'adresse techsupport@technimount.com.

Coordonnées

Technimount Medicale Inc.

À l'attention de : Affaires réglementaires

3770, rue Jean Marchand, bureau 100-B

Québec (Québec) G2C 1Y6

Canada

customerservice@technimount.com

techsupport@technimount.com

legal@technimount.com

www.technimount.com

T + 1 581 700-6583

SF + 1 888 521-0871 (Amérique du Nord)

Table des matières

Droits d'auteur	ii
Marques de commerce	ii
Coordonnées	ii
1. Directives de sécurité	4
2. Schémas d'orientation du Chariot néonatal THS	7
3. Pièces illustrées du Chariot néonatal THS	9
4. Fonctionnement du Chariot néonatal THS	11
..... 4.1. Accoupler le Chariot néonatal THS avec l'incubateur.....	11
..... 4.1.1. Accoupler le Chariot néonatal THS avec l'incubateur Babyleo TN500.....	11
..... 4.1.2. Accoupler le Chariot néonatal THS avec l'incubateur Babyroo TN300.....	13
..... 4.2. Désaccoupler le Chariot néonatal THS de l'incubateur.....	15
..... 4.2.1. Désaccoupler le Chariot néonatal THS de l'incubateur Babyleo TN500.....	15
..... 4.2.2. Désaccoupler le Chariot néonatal THS de l'incubateur Babyroo TN300.....	16
..... 4.3. Installer un cylindre à gaz de type D-M15 et Type E-M24.....	18
..... 4.4. Retirer un cylindre à gaz de type D-M15 et Type E-M24.....	19
..... 4.5. Installation du bocal d'aspiration Serres (facultatif).....	19
..... 4.6. Retrait du bocal d'aspiration Serres (facultatif).....	20
..... 4.7. Opérer les tiges à soluté.....	20
5. Effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes	21
..... 5.1. Outils requis.....	21
..... 5.2. Vérifications de sécurité quotidiennes.....	21
..... 5.3. Points d'inspection illustrés.....	24

1. Directives de sécurité



AVERTISSEMENT – Point de pincement/écrasement

Garder les doigts éloignés de l'extrémité du bras rabattable et de son mécanisme à déclenchement rapide lors des manipulations de couplage. Les pièces mobiles peuvent représenter un risque de pincement.



AVERTISSEMENT – Risque de blessure

S'assurer que le couplage entre le bras rabattable du chariot de transport et le dispositif d'accouplement THS™ sous l'incubateur soit sécurisé avant l'utilisation, afin d'éviter tout risque de déconnexion entre le patient et les équipements de support des fonctions vitales et de détachement du chariot de transport. Si la partie rouge de la tige du bouton du mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable est visible, le mécanisme de verrouillage du système n'est pas bien engagé.



AVERTISSEMENT – Avertissement général

- **Ne pas** effectuer de vérifications de sécurité sur les produits Technimount avant de recevoir la formation appropriée.
- Effectuer les vérifications de sécurité, comme décrites dans ce guide d'utilisation. Le non-respect des directives recommandées peut entraîner des dommages prématurés au produit.
- Une mauvaise utilisation du produit Technimount peut endommager l'appareil ou causer des blessures aux patients ou au personnel clinique.
- En cas d'incidents graves avec le chariot de transport, cesser immédiatement l'utilisation du produit Technimount, contacter le Support Technique à technicalsupport@technimount.com pour obtenir un plan de mesures correctives, puis rapporter l'incident aux autorités appropriée.



ATTENTION – Pratique sécuritaire

- Toujours s'assurer que le mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable soit sécurisé et fonctionnel avant l'utilisation.
- Toujours s'assurer que les mécanismes de verrouillage de tous les supports d'équipements médicaux installés sur le système de rail et les surfaces du chariot de transport soient engagés et fonctionnels avant l'utilisation.
- Toujours porter une attention particulière à l'état des quatre (4) freins et du mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable, afin d'éviter tout risque excessif pour le chariot de transport, les patients et le personnel clinique. Suivre le plan de maintenance recommandé et ses directives, comme décrit dans ce manuel de l'utilisateur et dans le guide d'utilisation.
- S'exercer à utiliser de façon sécuritaire le chariot de transport jusqu'à ce que les manipulations aient été perfectionnées, avant de les utiliser avec les patients. Une mauvaise utilisation d'un produit Technimount peut l'endommager ou causer des blessures aux patients ou au personnel clinique.

**ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires**

- **Ne pas** sécuriser ou détacher un cylindre à gaz lorsque le chariot de transport est en déplacement, afin d'éviter le risque de bris, de chute d'équipement ou de blessures aux patients ou au personnel clinique. Toujours attendre que le chariot de transport soit immobile avant de manipuler les courroies. Ce système de fixation a été conçu pour le transport de cylindre à gaz de type D-M15 et type E-M24 lors des transferts intrahospitalier.
- **Ne pas** utiliser de rallonge électrique. Au besoin, alimenter les appareils médicaux sur le chariot de transport à l'aide des cordons d'alimentation fournis.
- **Ne pas** utiliser le bras rabattable comme appui-pied. S'assurer que le bras rabattable soit attaché dans son support lorsque le chariot de transport est séparé de l'incubateur ou qu'il est rangé. Lorsque le bras est à sa position basse, il pourrait causer un risque de trébuchement ou de basculement.
- Toujours ralentir la descente du bras rabattable lorsqu'il est descendu pour l'alignement avec le dispositif d'accouplement THS™. Descendre le bras trop rapidement ou dépassé le point d'alignement pourrait causer un risque de désalignement des composantes ou endommager le produit.
- S'assurer que le câble d'alimentation de l'unité d'alimentation sans coupure (ci-après nommé "ASC") soit débranché et enroulé sur le crochet de gestion du câble une fois la charge de l'unité terminée et/ou avant de transporter le chariot de transport.
- S'assurer que le système de freinage soit appliqué aux quatre (4) roulettes pivotantes à double roue lorsque le Chariot néonatal THS est immobilisé ou qu'il n'est pas en fonction, afin de prévenir le risque de basculement.
- Une (1) personne est requise pour le déplacement sécuritaire du chariot de transport et deux (2) personnes, pour le déplacement sécuritaire du chariot de transport et l'incubateur lorsqu'ils sont attachés. Pour le transport avec un patient, toujours se référer et suivre les protocoles de transport de votre centre hospitalier.

**ATTENTION – Charge utile/équilibre de la charge**

- **Ne pas** surcharger le chariot de transport, afin d'éviter un risque de basculement ou d'écrasement. La charge maximale utile est de 136,1 kg (300 lb) total.
- **Ne pas** surcharger les composantes du chariot de transport. Les capacités de charge maximale sont :
 - Tablette supérieure et le protecteur ASC/tablette : 27,22 kg (60 lb), par tablette
 - Tablette ASC : 68,04 kg (150 lb)
 - Rails horizontales : 18,14 kg (40 lb), par rail
 - Tiges à soluté :
 - Partie supérieure de la tige à soluté : 4,5 L (160 oz liq.), par tige
 - Partie inférieure de la tige à soluté : 9,07 kg (20 lb), par tige



ATTENTION – Suivre les instructions d'utilisation

- Lire et toujours respecter toutes les directives de sécurité indiquées, ainsi que les instructions fournies dans la documentation utilisateur Technimount.
- Consulter la documentation utilisateur du Dräger Babyleo® TN500 pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire de l'incubateur.
- Consulter la documentation utilisateur du Dräger Babyroo® TN300 pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire de l'incubateur.
- Ce chariot de transport peut contenir de l'équipement médical et/ou accessoires optionnels. Consulter leur documentation utilisateur spécifique pour connaître les consignes de sécurité, les instructions d'utilisation et l'utilisation en toute sécurité avec le Chariot néonatal THS.

2. Schémas d'orientation du Chariot néonatal THS

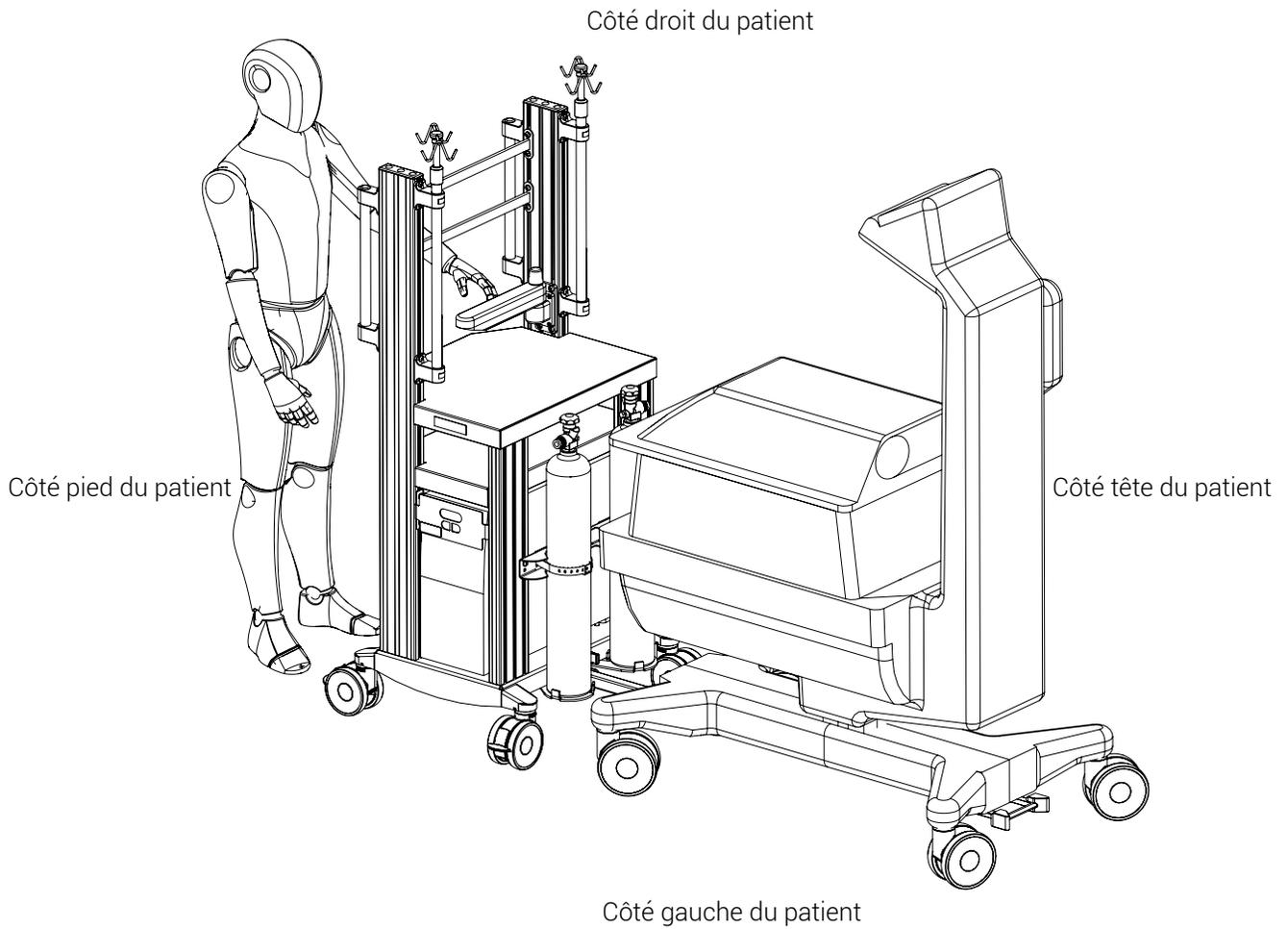


Figure 1 : Schéma d'orientation du Chariot néonatal THS, illustré avec l'incubateur Babyleo® TN500


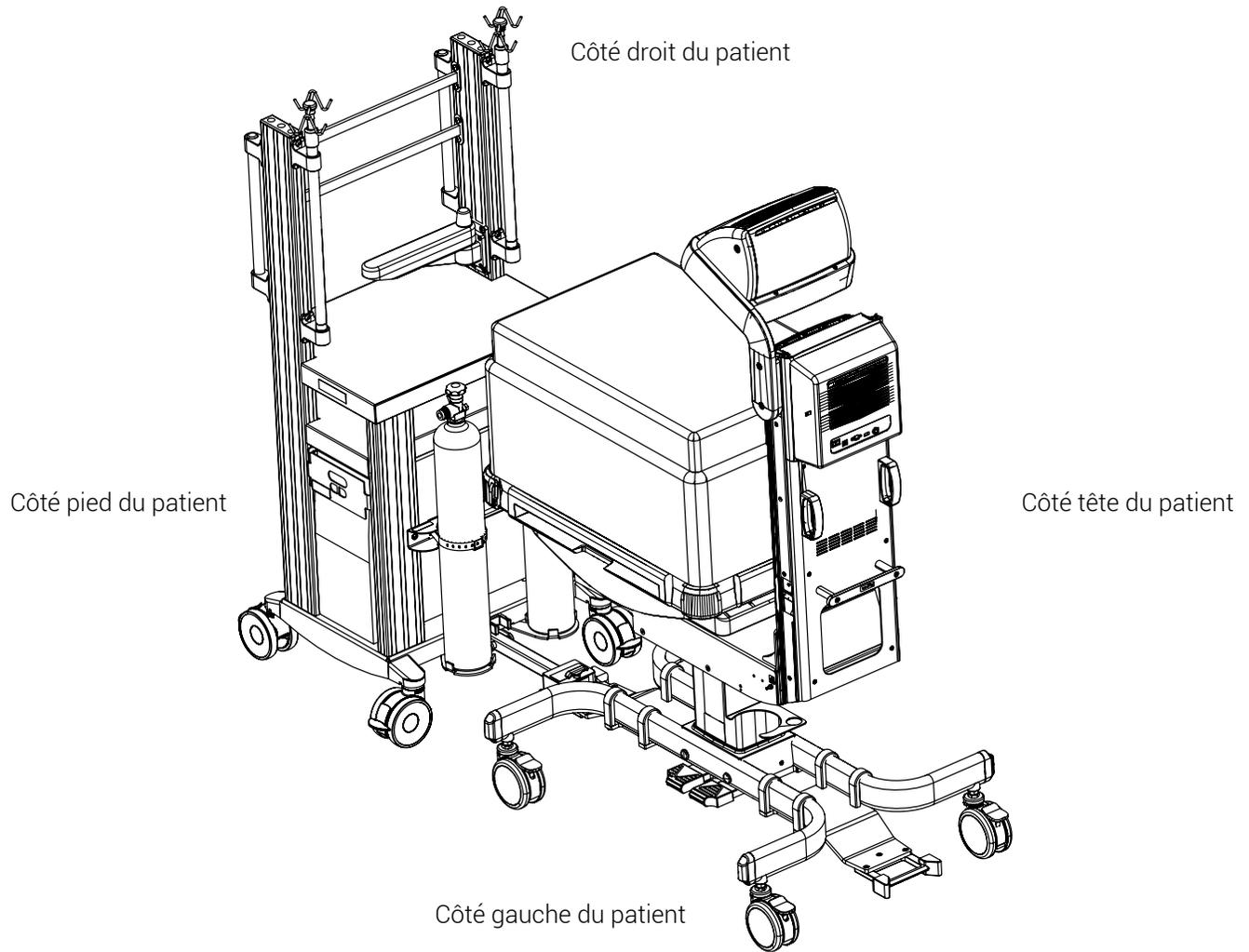



Figure 2 : Schéma d'orientation du Chariot néonatal THS, illustré avec l'incubateur Babyroo® TN300

3. Pièces illustrées du Chariot néonatal THS

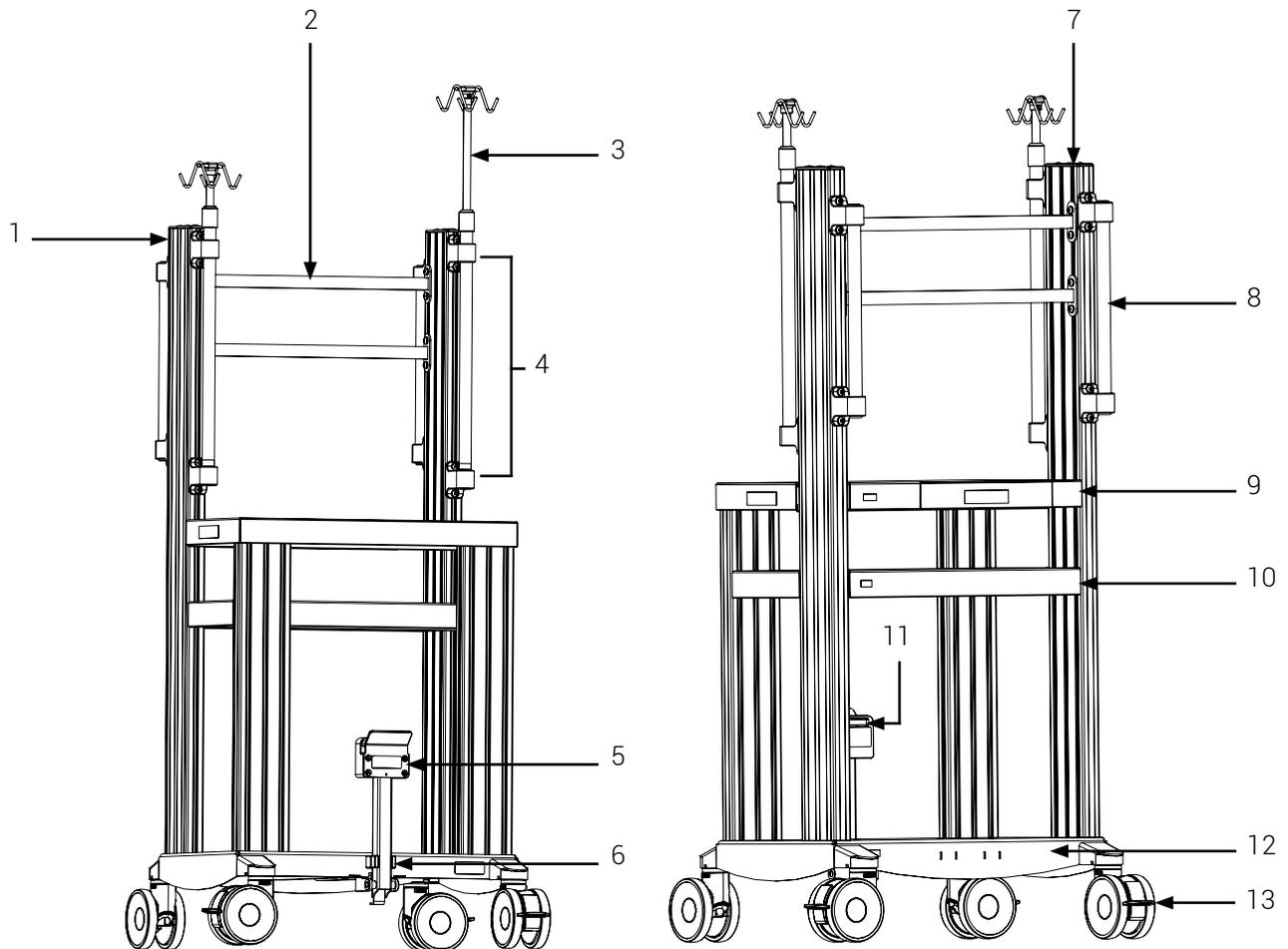

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Système de rails verticaux | 9. Tablette supérieure |
| 2. Rail horizontal (2X) | 10. Protecteur ASC/tablette |
| 3. Tige à soluté extensible (2X) | 11. Mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable |
| 4. Support pour tige à soluté (2X) | 12. Tablette ASC |
| 5. Bras rabattable | 13. Roulette double pivotante avec système de freinage (4X) |
| 6. Support du bras rabattable | |
| 7. Capuchon (2X) | |
| 8. Poignée (2X) | |

Figure 3 : Composantes du Chariot néonatal THS

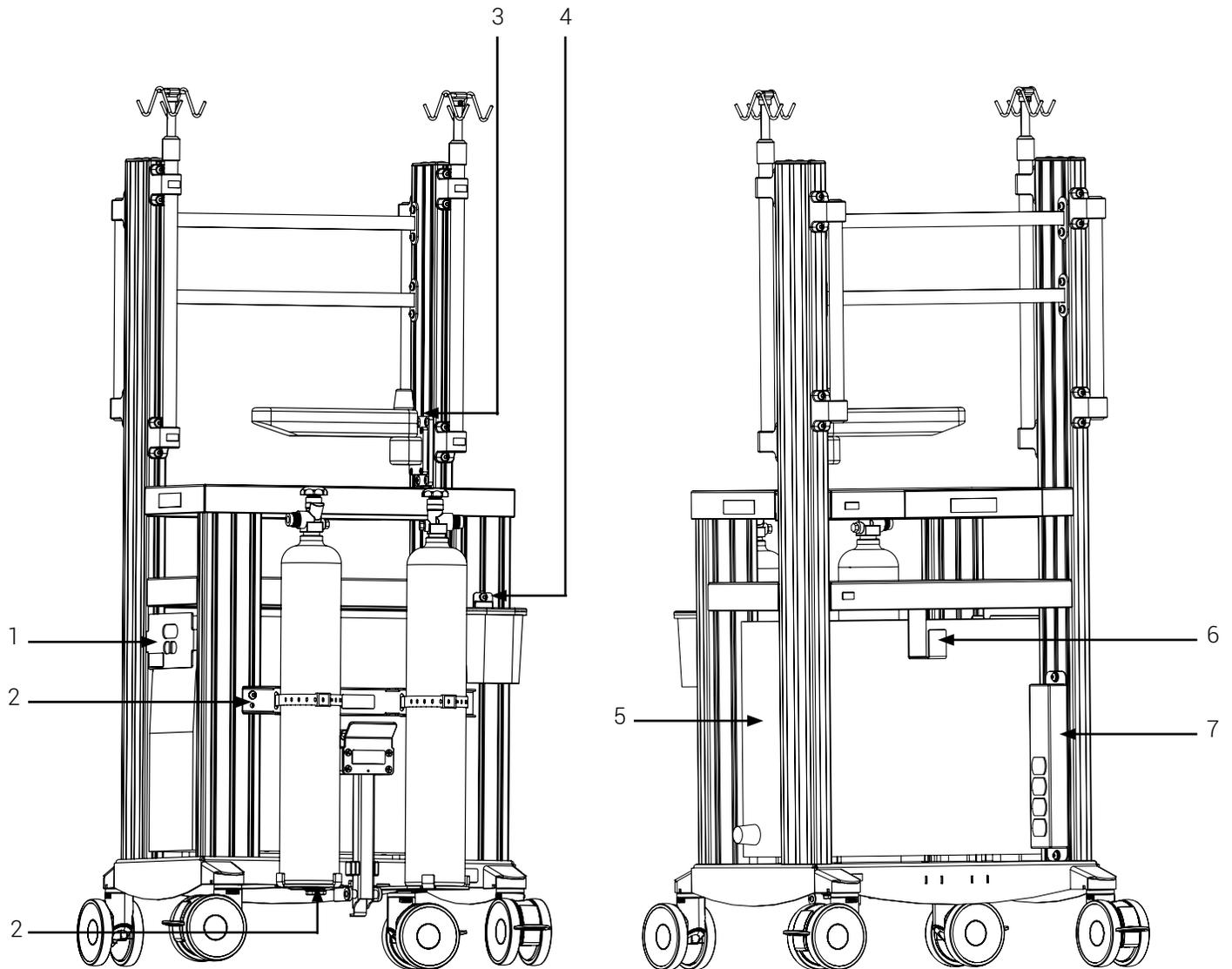

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Panneau protecteur du bouton d'alimentation de l'ASC 2. Support pour cylindre à gaz (support en 2 parties) 3. Plaque-support du système de support Dräger avec adaptateur SLIDE | <ul style="list-style-type: none"> 4. Plaque-support du bocal d'aspiration Serres 5. Unité ASC 6. Crochet de gestion du câble ASC 7. Barre d'alimentation de grade médicale avec protection contre les surtensions |
|--|--|

Figure 4 : Accessoires optionnels du Chariot néonatal THS

4. Fonctionnement du Chariot néonatal THS

Le contenu ci-inclus est destiné au personnel clinique chevronné, qui ont reçus la formation requise et qui possèdent les connaissances pour opéré de façon sécuritaire le produit et effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes. Suivre les instructions d'opération pour vous aider à utiliser efficacement et de façon sécuritaire le Chariot néonatal THS et déplacer les incubateurs néonatal et les multiples appareils médicaux nécessaires aux soins des nouveaux-nés, lors des transferts intrahospitalier. Pour obtenir des renseignements détaillés sur le produit qui ne sont pas liés à l'utilisation ni mentionné ici, consulter votre administrateur/directeur/superviseur ou le manuel de l'utilisateur.

REMARQUE : Effectuer toujours les vérifications de sécurité **avant** d'utiliser le Chariot néonatal THS. Consulter les « Vérifications de sécurité quotidiennes » à la page 21 avant chaque utilisation.

REMARQUE : Technimount cherche continuellement à améliorer la conception et la qualité des produits. Bien que ce guide d'utilisation contienne les renseignements les plus récents sur le produit au moment de l'impression, il peut contenir des différences mineures avec la version actuelle. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com

4.1. Accoupler le Chariot néonatal THS avec l'incubateur

4.1.1. Accoupler le Chariot néonatal THS avec l'incubateur Babyleo TN500

1. Au besoin, débrancher le câble d'alimentation de l'unité ASC et l'enrouler sur le crochet de gestion du câble (Figure 5), situé sur le protecteur ASC/tablette.

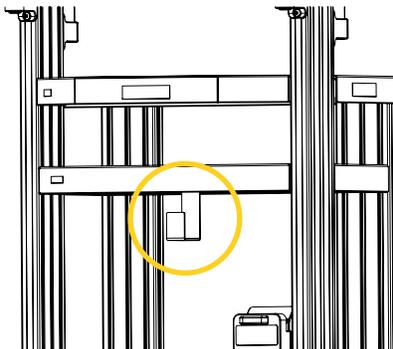


Figure 5 : Crochet de gestion du câble ASC

2. Au besoin, désengager le système de freinage des quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du Chariot néonatal THS.
3. Au besoin, désengager les quatre (4) freins de blocage de l'incubateur, puis engager la roulette de direction pour faciliter les déplacements rectilignes.

- Descendre le bras rabattable du Chariot néonatal THS avec votre pied pour le détacher de son support (Figure 6 A), puis faire pivoter le bras vers l'avant jusqu'à sa position finale (Figure 6 B).

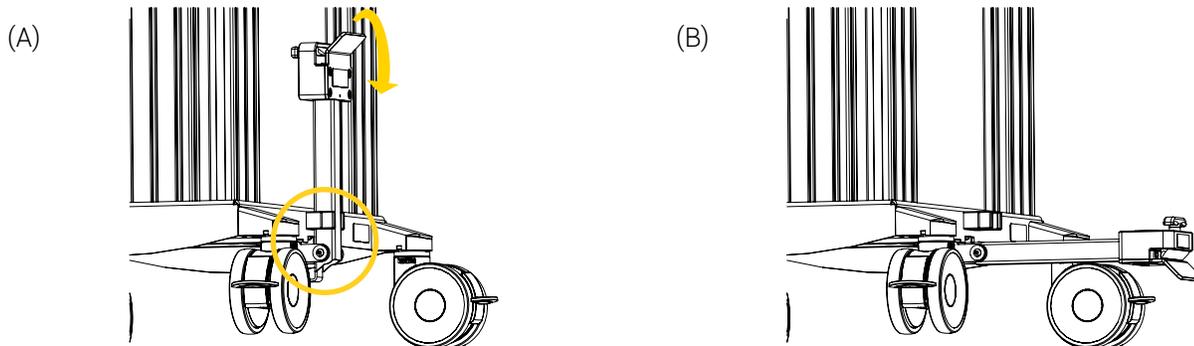


Figure 6 : Pivotement du bras rabattable

- Se placer sur le côté du chariot de transport, puis aligner le bras rabattable avec le dispositif d'accouplement THS sous l'incubateur (Figure 7 A).
- Pousser le chariot de transport vers l'incubateur, jusqu'à ce que le dispositif d'accouplement THS soit inséré et sécurisé dans le mécanisme de verrouillage du bras (Figure 7 B).

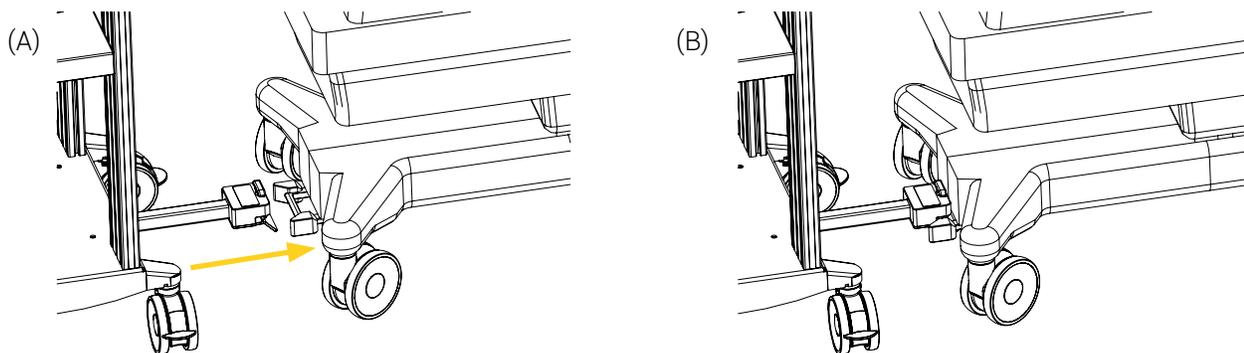


Figure 7 : Installation du chariot de transport sur l'incubateur Babyleo TN500

- S'assurer que le couplage entre le bras rabattable du chariot de transport et le dispositif d'accouplement THS sous l'incubateur Babyleo TN500 soit sécurisé (Figure 8).

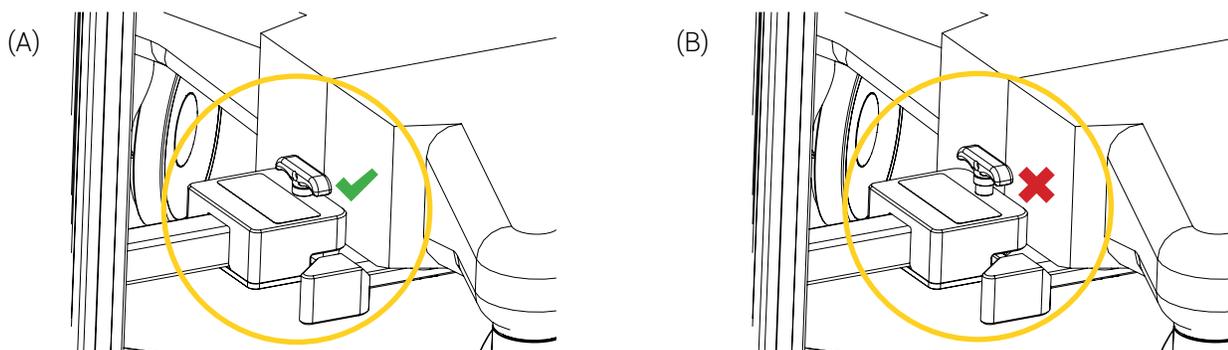


Figure 8 : Chariot néonatal THS installé sur l'incubateur Babyleo TN500

- Si le chariot de transport n'est pas immédiatement utilisé pour le transport, appliquer le système de freinage sur les quatre (4) roulettes pivotantes à double roue.

L'accouplement du Chariot néonatal THS avec l'incubateur Babyleo TN500 est complété.

4.1.2. Accoupler le Chariot néonatal THS avec l'incubateur Babyroo TN300

- Au besoin, débrancher le câble d'alimentation de l'unité ASC et l'enrouler sur le crochet de gestion du câble (Figure 9), situé sur le protecteur ASC/tablette.

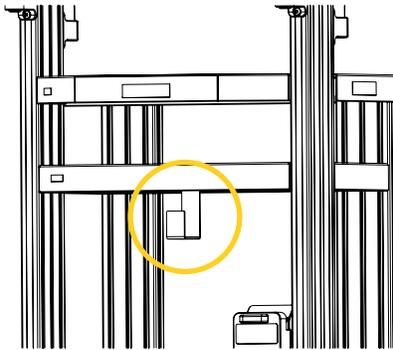


Figure 9 : Crochet de gestion du câble ASC

- Au besoin, désengager le système de freinage des quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du Chariot néonatal THS.
- Au besoin, désengager les quatre (4) freins de blocage de l'incubateur, puis engager la roulette de direction pour faciliter les déplacements rectilignes.
- Descendre le bras rabattable du Chariot néonatal THS avec votre pied pour le détacher de son support (Figure 10 A), puis faire pivoter le bras vers l'avant jusqu'à sa position finale (Figure 10 B).

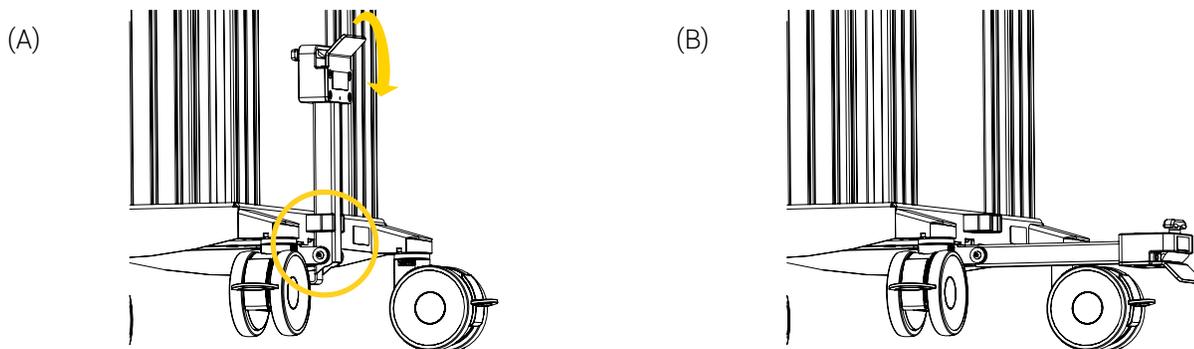


Figure 10 : Pivotement du bras rabattable

5. Se placer sur le côté du chariot de transport, puis aligner le bras rabattable avec le dispositif d'accouplement THS sous l'incubateur (Figure 11 A).
6. Pousser le chariot de transport vers l'incubateur, jusqu'à ce que le dispositif d'accouplement THS soit inséré et sécurisé dans le mécanisme de verrouillage du bras (Figure 11 B).

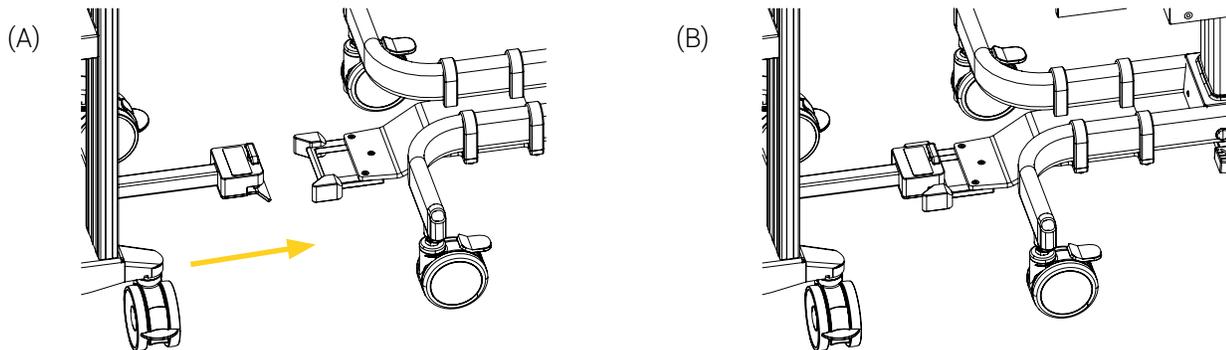


Figure 11 : Installation du chariot de transport sur l'incubateur Babyroo TN300

7. S'assurer que le couplage entre le bras rabattable du chariot de transport et le dispositif d'accouplement THS sous l'incubateur Babyroo TN300 soit sécurisé (Figure 12).

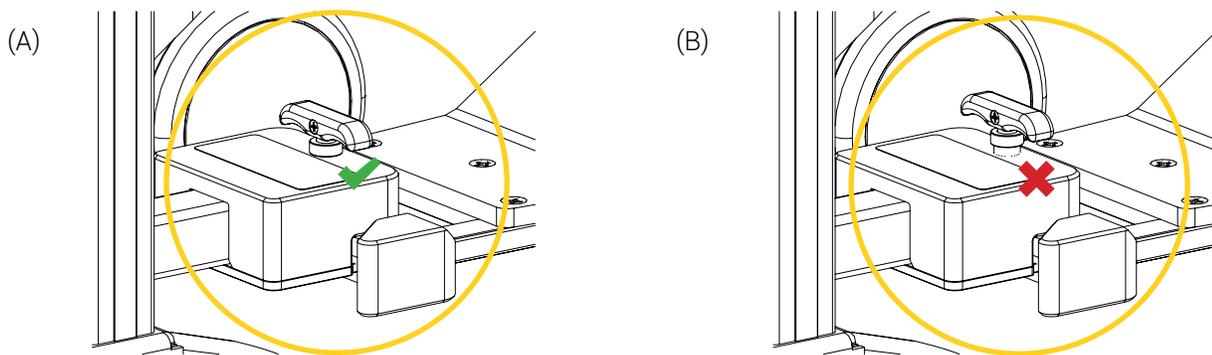


Figure 12 : Chariot néonatal THS installé sur l'incubateur Babyroo TN300

8. Si le chariot de transport n'est pas immédiatement utilisé pour le transport, appliquer le système de freinage sur les quatre (4) roulettes pivotantes à double roue.

L'accouplement du Chariot néonatal THS avec l'incubateur Babyroo TN300 est complété.

4.2. Désaccouplement le Chariot néonatal THS de l'incubateur

4.2.1. Désaccoupler le Chariot néonatal THS de l'incubateur Babyleo TN500

1. Au besoin, désengager le système de freinage des quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du Chariot néonatal THS.
2. Tirer et maintenir la poignée du mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable pour libérer le dispositif d'accouplement THS (Figure 13).

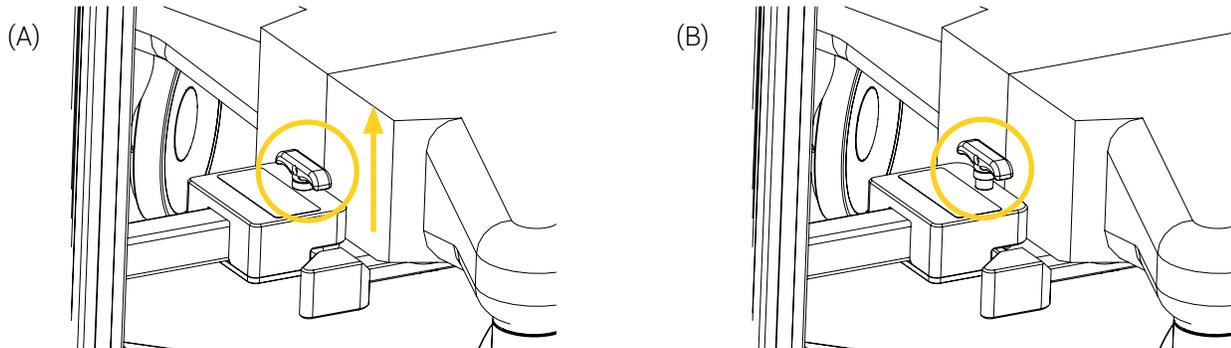


Figure 13 : Mécanisme à déclenchement rapide

3. Pousser le chariot de transport dans le sens opposé de l'incubateur Babyleo TN500 pour détacher le bras du dispositif d'accouplement THS, en retenant simultanément la poignée du mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable (Figure 14).

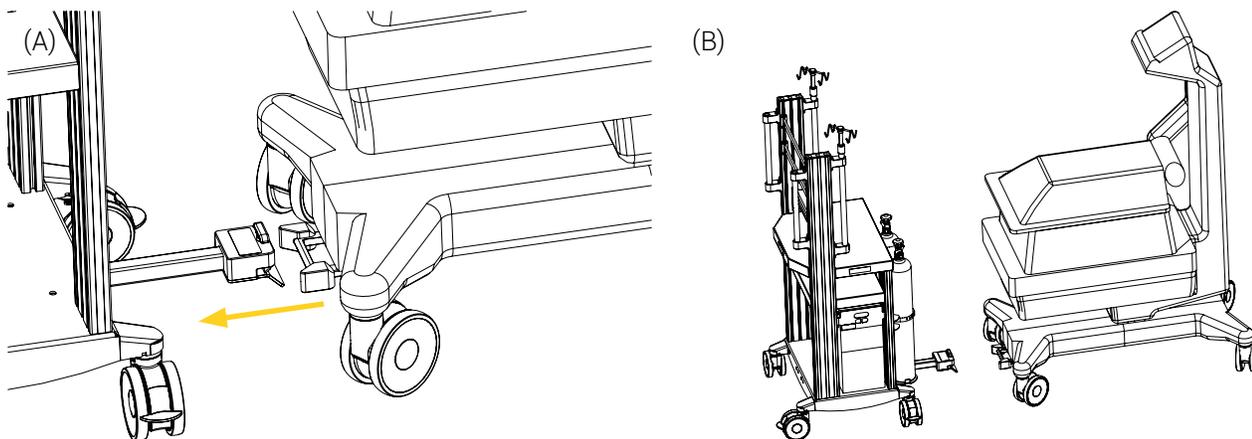


Figure 14 : Désaccouplement du chariot de transport de l'incubateur Babyleo TN500

4. Pivoter le bras rabattable vers le haut jusqu'à sa position finale, puis appuyer sur le bras pour l'insérer et le sécuriser dans son support à l'aide de votre pied (Figure 15).

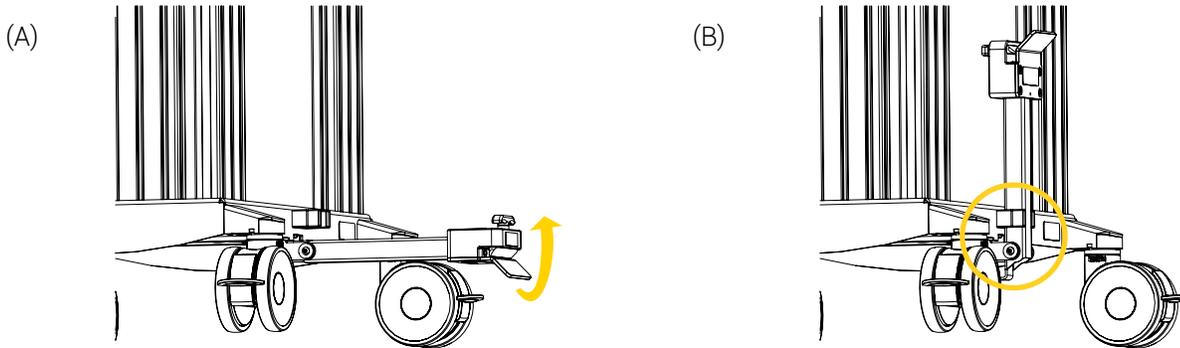


Figure 15 : Pivotement du bras rabattable

5. Appliquer le système de freinage sur les quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du chariot de transport.

Le désaccouplement du Chariot néonatal THS de l'incubateur Babyleo TN500 est complété.

4.2.2. Désaccoupler le Chariot néonatal THS de l'incubateur Babyroo TN300

1. Au besoin, désengager le système de freinage des quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du Chariot néonatal THS.
2. Tirer et maintenir la poignée du mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable pour libérer le dispositif d'accouplement THS (Figure 16).

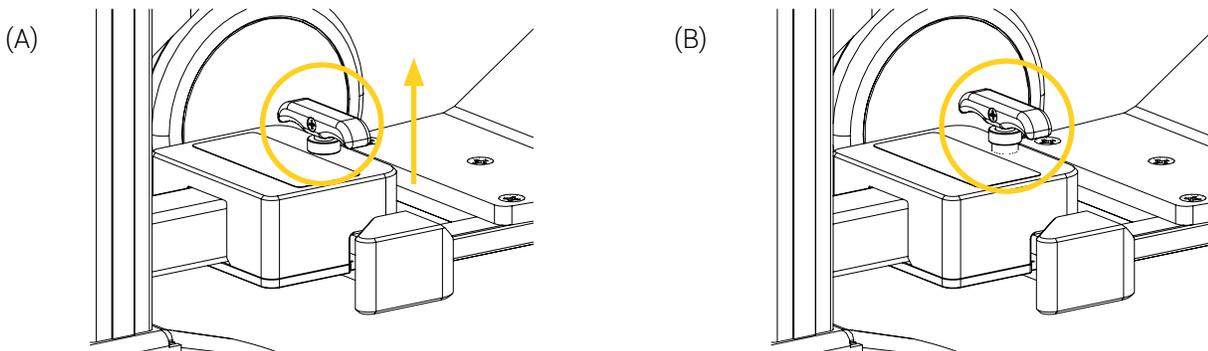


Figure 16 : Mécanisme à déclenchement rapide

3. Pousser le chariot de transport dans le sens opposé de l'incubateur Babyroo TN300 pour détacher le bras du dispositif d'accouplement THS, en retenant simultanément la poignée du mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable (Figure 17).

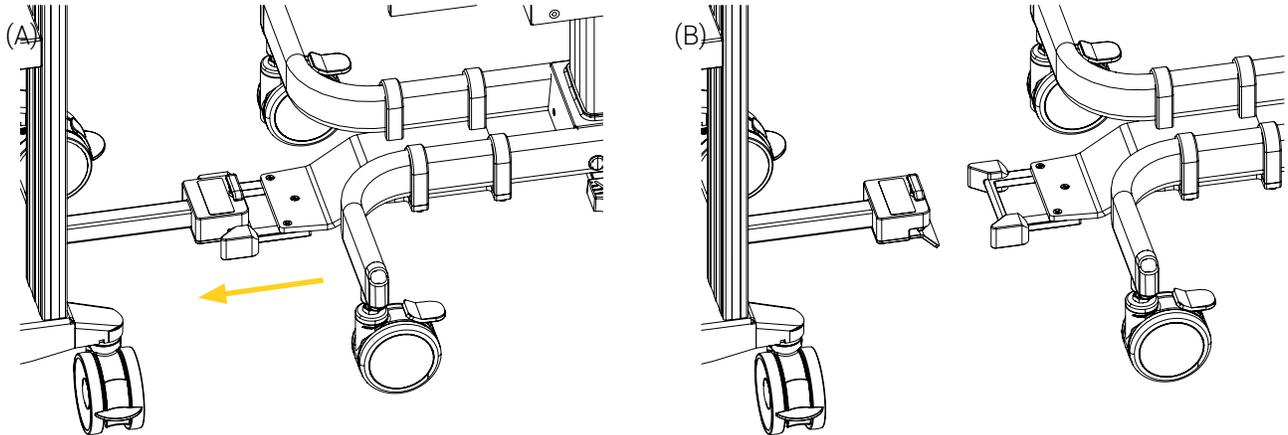


Figure 17 : Désaccouplement du chariot de transport de l'incubateur Babyroo TN300

4. Pivoter le bras rabattable vers le haut jusqu'à sa position finale, puis appuyer sur le bras pour l'insérer et le sécuriser dans son support à l'aide de votre pied (Figure 18).

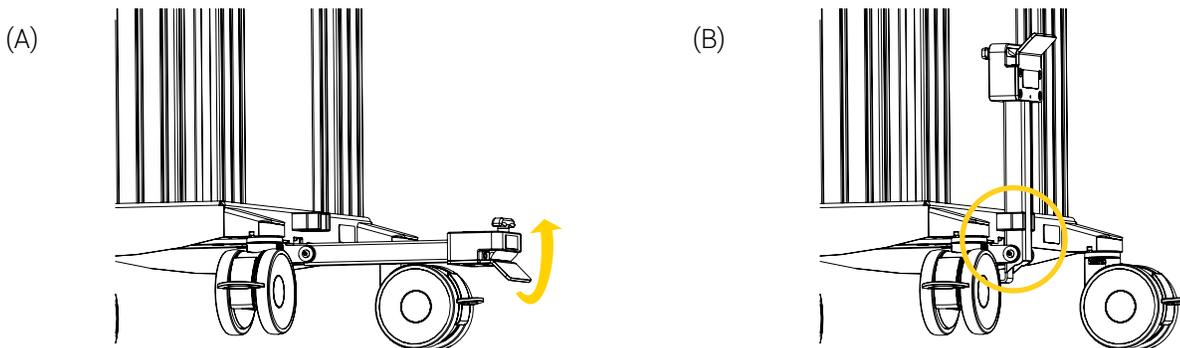


Figure 18 : Pivotement du bras rabattable

5. Appliquer le système de freinage sur les quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du chariot de transport.

Le désaccouplement du Chariot néonatal THS de l'incubateur Babyroo TN300 est complété.

4.3. Installer un cylindre à gaz de type D-M15 et Type E-M24

1. Appliquer le système de freinage sur les quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du chariot de transport.
2. Au besoin, détacher la courroie du support pour cylindres à gaz.
3. Insérer et positionner le cylindre à gaz sur la plaque inférieure du support (Figure 19).
4. Attacher et serrer la courroie fermement autour du cylindre à gaz à l'aide de la boucle pour le sécuriser.



ATTENTION – Manipulation et utilisation sécuritaires

S'assurer que le cylindre à gaz est bien sécurisé sur le chariot de transport avant de déplacer le système, afin d'éviter le risque de bris, de chute d'équipement ou de blessures aux patients ou au personnel clinique.

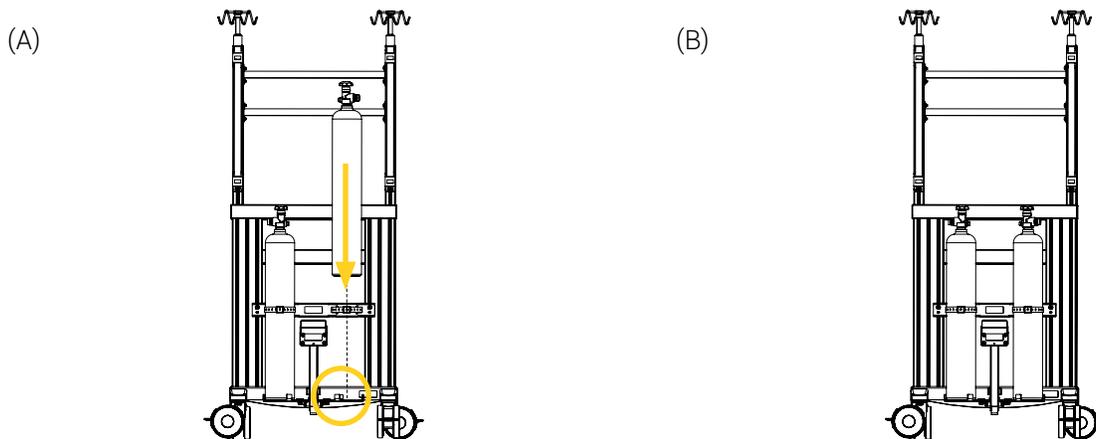


Figure 19 : Installation du cylindre à gaz dans le support

5. Au besoin, répéter les étapes 1 à 4 pour installer un deuxième cylindre à gaz sur le support.

L'installation du cylindre à gaz dans le support est complétée.

4.4. Retirer un cylindre à gaz de type D-M15 et Type E-M24

1. Appliquer le système de freinage sur les quatre (4) roulettes pivotantes à double roue du chariot de transport.
2. Détacher la courroie du support pour cylindres à gaz.
3. Soulever et retirer le cylindre à gaz du support et le mettre de côté (Figure 20 A).
4. Au besoin, répéter les étapes 1 à 3 pour retirer un deuxième cylindre à gaz (Figure 20 B).

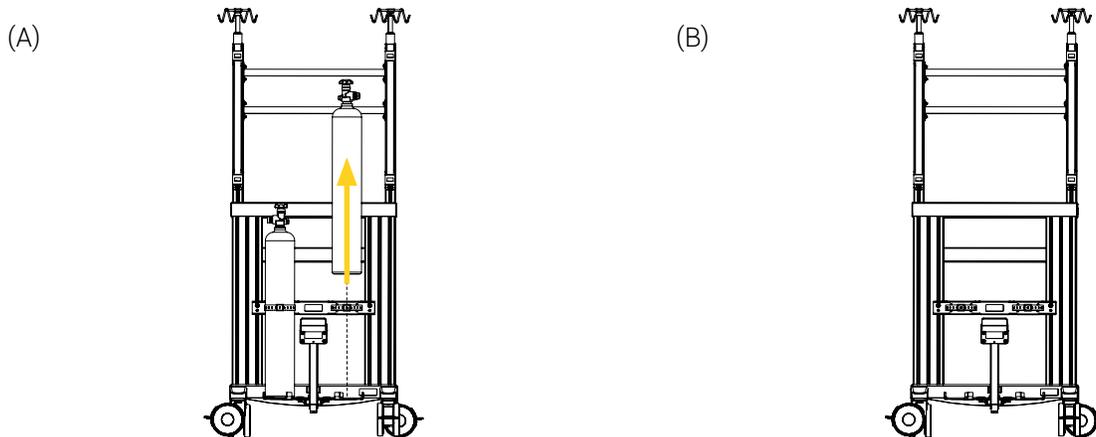


Figure 20 : Retrait du cylindre à gaz du support

Le retrait du cylindre à gaz du support est complétée.

4.5. Installation du bocal d'aspiration Serres (facultatif)

1. Insérer le support encastré du bocal dans l'adaptateur Serres, jusqu'au fond de la plaque-support (Figure 21).
2. Déplacer le bocal de haut en bas pour vous assurer qu'il soit bien installé dans le support.

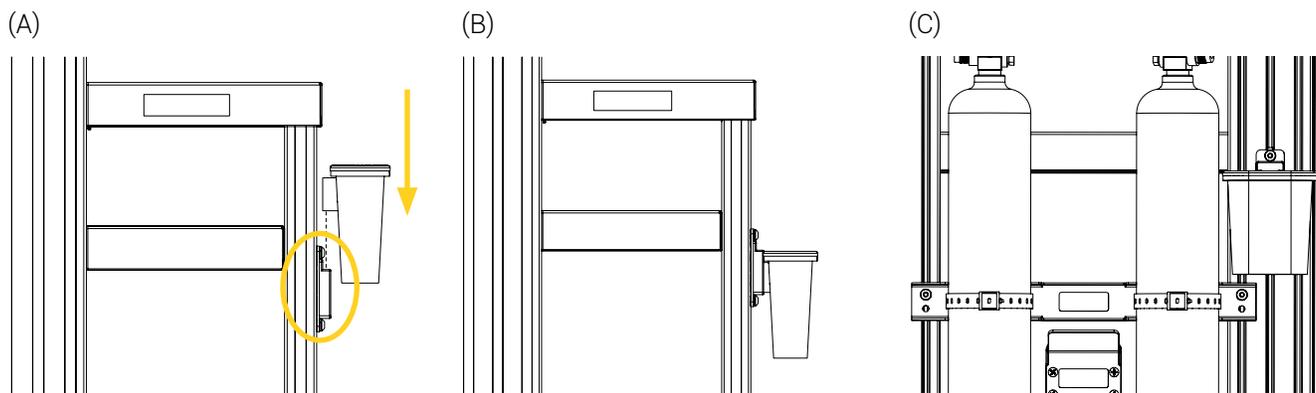


Figure 21 : Installation du bocal d'aspiration Serres (côté et devant du chariot de transport illustré)

L'installation du bocal d'aspiration Serres dans le support est complétée.

4.6. Retrait du bocal d'aspiration Serres (facultatif)

Tirer le bocal vers le haut pour le retirer du support (Figure 22).

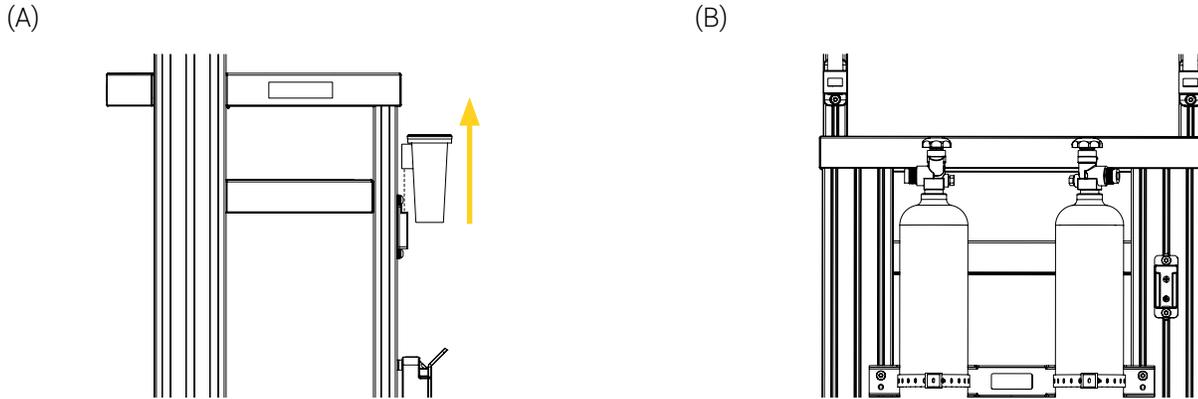


Figure 22 : Retrait du bocal d'aspiration Serres

Le retrait du bocal d'aspiration Serres du support est complétée.

4.7. Opérer les tiges à soluté

Au besoin, les tiges à soluté peuvent être ajustées en hauteur pour répondre aux besoins spécifiques de positionnement de l'équipement. Avant d'ajouter vos sacs à soluté, se référer aux directives de sécurité et au manuel de l'utilisateur pour obtenir des précisions sur la charge maximale utile de la tige à soluté.

1. Desserrer le collet de la tige à soluté en le tournant dans le sens antihoraire environ un quart de tour, puis monter ou descendre la tige selon vos besoins (Figure 23).
2. Resserrer le collet.
3. Au besoin, répéter les étapes 1 à 2 pour ajuster la hauteur de la deuxième tige à soluté.

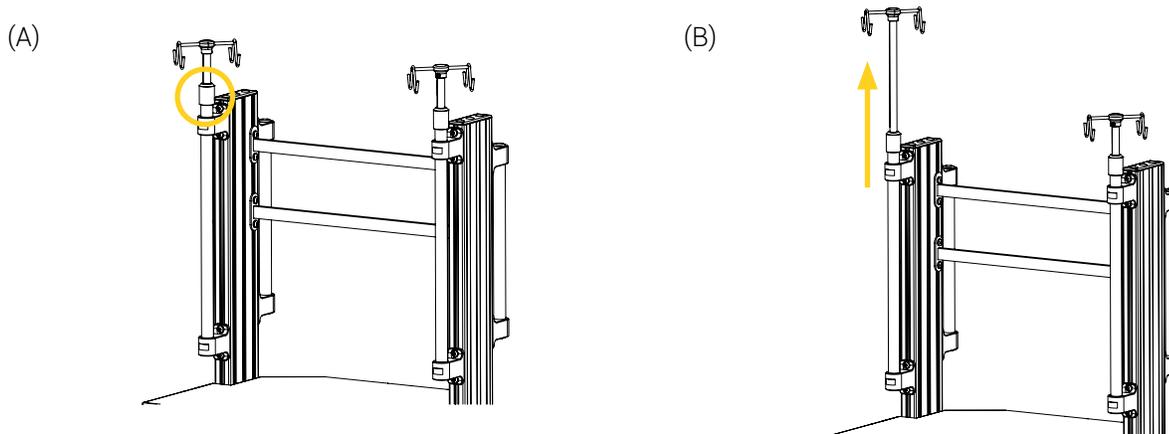


Figure 23 : Ajustement de la hauteur de la tige à soluté

5. Effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes

Des vérifications de sécurité quotidiennes sur les produits Technimount sont recommandées pour les garder en bon état et éviter toute défaillance ou blessure au patient ou au personnel clinique. Le personnel clinique doit effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes au début de chaque quart de travail.

REMARQUE : Toujours conserver les dossiers de toutes vos activités de maintenance et retirer immédiatement les produits défectueux ou expirés de votre inventaire.

Communiquer avec le soutien technique à l'adresse techsupport@technimount.com pour tout problème lié aux pièces de rechange ou à la réparation.

5.1. Outils requis

- Linge sec et propre

5.2. Vérifications de sécurité quotidiennes


Voir en référence les points d'inspection illustrés sur le chariot de transport (Figure 24) et sous les incubateurs (Figure 25 et Figure 26), au besoin.

REMARQUE : En cas de non-conformité, aviser le superviseur de la maintenance de toutes les non-conformités et cesser immédiatement l'utilisation.

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ QUOTIDIENNES	CONFORME	
	OUI	NON
INSPECTIONS		
Chariot néonatal THS (Figure 24)		
- Inspecter visuellement le chariot de transport pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Inspecter visuellement les rails verticaux et horizontaux pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Inspecter visuellement les cavités de chaque rail pour vous assurer qu'il n'y a pas de particules de logées. Si c'est le cas, retirer immédiatement à l'aide d'un linge propre et sec.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Inspecter visuellement les poignées pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommage ou d'attaque chimique et que le matériel est en bon état.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Inspecter visuellement les cavités du système de freinage de chaque roulette double pivotante et s'assurer qu'il n'y a pas de particules logées. Si c'est le cas, retirer immédiatement à l'aide d'un linge propre et sec.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Appuyer/tirer sur le frein de chaque roulettes pivotantes à double roue et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Les mécanismes devraient barrer et débarrer sans résistance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bras rabattable et son support (Figure 24)		
- Inspecter visuellement le bras rabattable et son support et s'assurer qu'il n'y a pas de particules logées. Si c'est le cas, retirer immédiatement à l'aide d'un linge propre et sec.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ QUOTIDIENNES		CONFORME	
INSPECTIONS		OUI	NON
- Insérer/retirer le bras de son support pour vous assurer que le mécanisme fonctionne bien. Lorsque le bras est levé et inséré dans son support, le bras devrait y rester attaché.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Installer/retirer le chariot de transport de l'incubateur et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Le chariot de transport devrait pouvoir se rattacher et se verrouiller au son du clic du mécanisme de sécurité et facilement détaché avec le mécanisme à déclenchement rapide.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositifs d'accouplement THS (Figure 25 et Figure 26)			
- Inspecter visuellement le dispositif d'accouplement THS sous l'incubateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Inspecter visuellement les guides du dispositif d'accouplement THS sous l'incubateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tige à soluté (Figure 24)			
- Inspecter visuellement tous les composants des tiges à soluté pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous assurer que les collets de chaque tige à soluté sont serrés. Les tiges doivent être fixes.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accessoires optionnels			
- Inspecter visuellement tous les composants des accessoires optionnels, pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées :		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- le support à cylindre à gaz			
- la plaque de support du bocal d'aspiration Serres			
- la plaque de support de la barre d'alimentation			
- la plaque de support du système de montage Dräger			
- le crochet de gestion du câble de l'unité ASC			
- le protecteur du bouton de l'alimentation de l'unité ASC			
- les patins de glissement sous l'unité ASC			
- S'assurer de suivre les recommandations du manufacturier pour les vérifications et instructions de maintenance de tous les appareils médicaux qui pourraient être installés sur le chariot de transport.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3. Points d'inspection illustrés

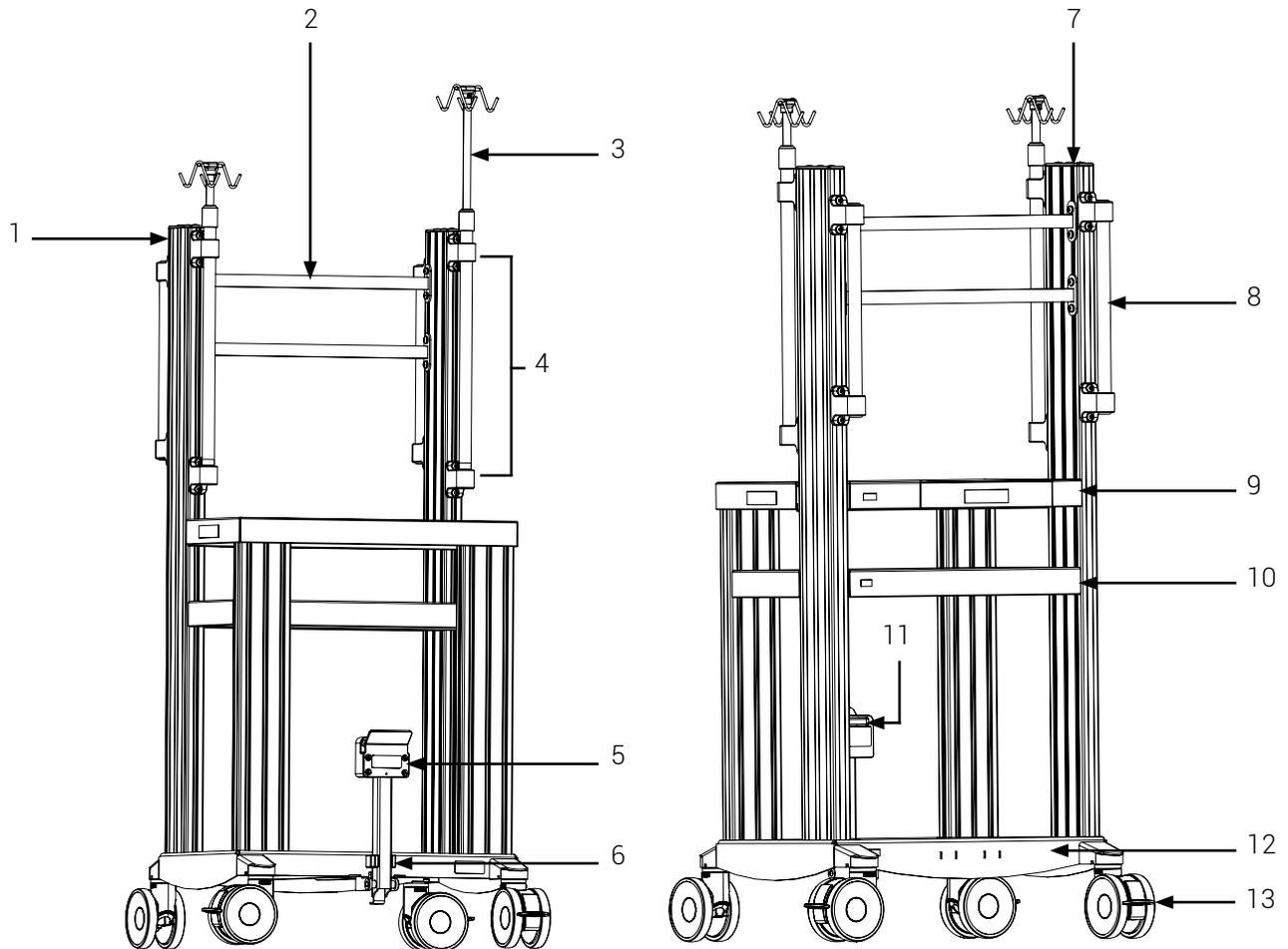


- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Système de rails verticaux | 9. Tablette supérieure |
| 2. Rail horizontal (2X) | 10. Protecteur ASC/tablette |
| 3. Tige à soluté extensible (2X) | 11. Mécanisme à déclenchement rapide du bras rabattable |
| 4. Support pour tige à soluté (2X) | 12. Tablette ASC |
| 5. Bras rabattable | 13. Roulette double pivotante avec système de freinage (4X) |
| 6. Support du bras rabattable | |
| 7. Capuchon (2X) | |
| 8. Poignée (2X) | |

Figure 24 : Points d'inspection du chariot de transport

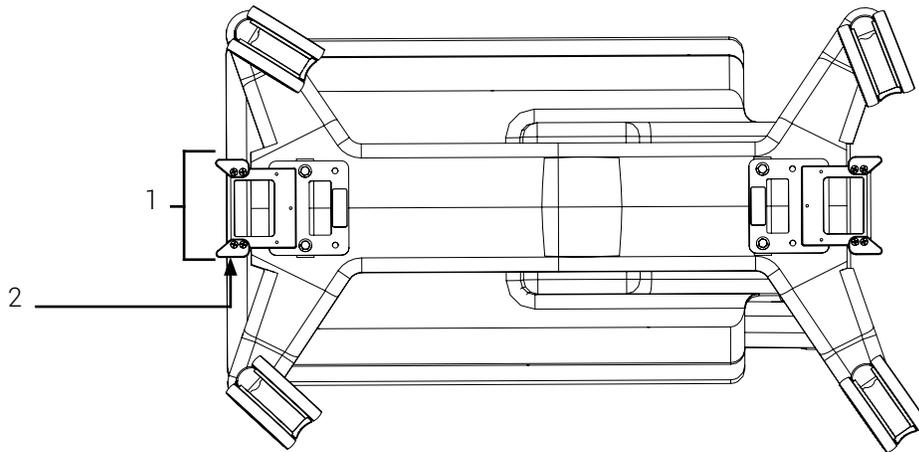


- | | |
|---|--|
| 1. Dispositif d'accouplement THS (1-2X, selon la configuration) | 2. Guide (2X sur chaque dispositif d'accouplement) |
|---|--|

Figure 25 : Points d'inspection sous l'incubateur Babyleo TN500 (deux (2) dispositifs d'accouplement THS illustrés)

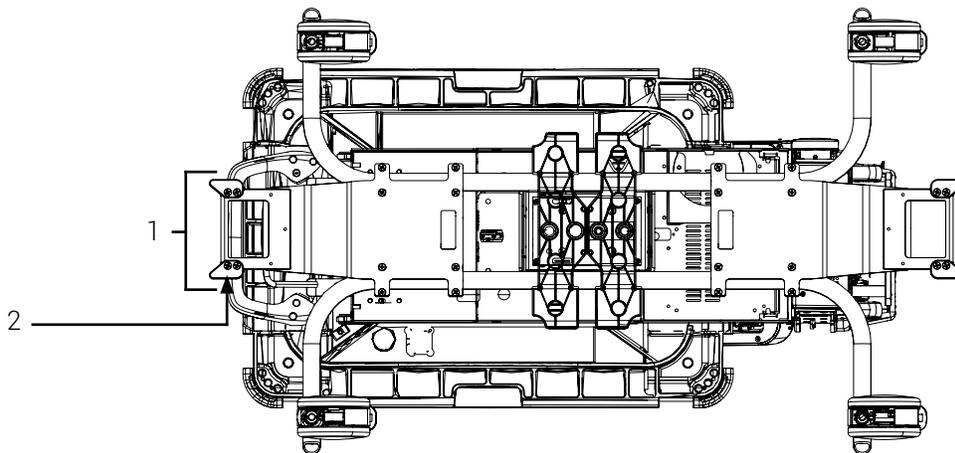

- | | |
|---|--|
| 1. Dispositif d'accouplement THS (1-2X, selon la configuration) | 2. Guide (2X sur chaque dispositif d'accouplement) |
|---|--|

Figure 26 : Points d'inspection sous l'incubateur Babyroo TN300 (deux (2) dispositifs d'accouplement THS illustrés)

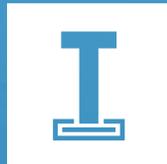

TECHNIMOUNT MEDICAL®

Chez Technimount Médicale Inc., nous comprenons que les professionnels de la santé ont besoin d'équipements qui facilitent leur pratique quotidienne. Nous concevons et développons des solutions de qualité, flexibles et faciles à utiliser, qui leur permettent de se concentrer sur ce qui compte le plus : les soins aux patients.

Technimount Médicale, une société certifiée ISO 13485, crée des produits distinctifs qui répondent à l'évolution constante des pratiques de soins de santé. Nos gammes de produits Technimount Healthcare System™ (THS™) et Healthcare Essentials permettent au personnel soignant de déplacer efficacement et en toute sécurité tous les dispositifs médicaux nécessaires pour traiter avec succès leurs patients, qu'ils se trouvent à l'hôpital ou à distance via des systèmes de télémédecine.

TECHNIMOUNT MEDICALE INC.

3770, rue Jean Marchand, bureau 100-B

Québec (Québec) G2C 1Y6

Canada

T + 1 581 700-6583

SF + 1 888 521-0871 (Amérique du Nord)

technimount.com

