



TECHNIMOUNT
EMS[®]

BRACKET PRO SERIE[®] 221

GUIDE D'UTILISATION

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ
LÀ OÙ C'EST IMPORTANT



Droits d'auteur

Droits d'auteur 2023 Gestion Technimount S.A.M.U. Inc. (Technimount EMS) est une société affiliée de Technologies CGC Inc. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de récupération, traduite dans une langue quelconque, modifiée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite de Technimount ou de ses sociétés affiliées.

Marques de commerce

Les noms des fabricants de produits et d'appareils médicaux sont des marques de commerce^{MC} ou des marques déposées^{MD} de leurs détenteurs respectifs.

- Technimount EMS®, Bracket Pro Serie® et Safety MD-Transporter® sont des marques déposées de Technologies CGC Inc.
- Plum 360™ est une marque de commerce de ICU Medical Inc.

Pour tout problème avec votre produit Technimount, ses composants ou pour toute question technique pendant l'installation, l'utilisation ou la maintenance, communiquer avec le soutien technique à l'adresse techsupport@technimount.com.

Coordonnées

Gestion Technimount S.A.M.U. Inc.

À l'attention de : Affaires réglementaires
3770, rue Jean Marchand, bureau 100-C
Québec (Québec) G2C 1Y6
Canada

customerservice@technimount.com

techsupport@technimount.com

legal@technimount.com

www.technimount.com

T + 1 581 700-6613

SF + 1 888 639-2758 (Amérique du Nord)

Table des matières

Droits d'auteur	ii
Marques de commerce.....	ii
Coordonnées	ii
1. Directives de sécurité	4
2. Fonctionnement du support Bracket Pro Serie 221.....	5
..... 2.1. Installer le PLUM 360 dans le support Bracket Pro Serie 221.....	6
..... 2.2. Retirer le PLUM 360 du support Bracket Pro Serie 221.....	8
3. Effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes	9
..... 3.1. Outils requis	9
..... 3.2. Vérifications de sécurité quotidiennes.....	9
..... 3.3. Points d'inspection illustrés	12

1. Directives de sécurité



AVERTISSEMENT - Avertissement général

- **Ne pas effectuer** de vérifications de sécurité sur les produits Technimount avant de recevoir la formation appropriée.
- Effectuer les vérifications de sécurité, comme décrit dans ce guide d'utilisation. Le non-respect des directives recommandées peut entraîner des dommages prématurés au produit.



ATTENTION - Manipulation et utilisation sécuritaires

- Une mauvaise utilisation du produit Technimount peut endommager l'appareil ou causer des blessures aux patients ou au personnel des services médicaux d'urgence.
- Si un incident grave survient avec le support, cesser immédiatement d'utiliser le produit, signaler cet incident au soutien technique à l'adresse technicalsupport@technimount.com et à l'organisme de réglementation concerné.



ATTENTION - Pratique sécuritaire

- Porter toujours une attention particulière à l'état des mécanismes de sécurité afin d'éviter tout risque excessif pour l'appareil, les patients et le personnel des services médicaux d'urgence. Suivre les directives recommandées décrites dans le présent document.
- Garder ce document à portée de main du produit en tout temps.



ATTENTION - Charge utile/équilibre de la charge

Ne pas surcharger le système. La charge maximale utile est de 10 lb (4,5 kg).



ATTENTION - Suivre les instructions d'utilisation


- Lire et toujours respecter toutes les directives de sécurité indiquées, ainsi que les instructions fournies dans le présent document.
- Consulter le manuel de l'utilisateur du fabricant pour connaître les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation sécuritaire de la pompe à infusion Plum 360™.

2. Fonctionnement du support Bracket Pro Serie 221

Ce guide a pour objectif d'aider le personnel des services médicaux d'urgence à sécuriser la pompe à infusion Plum 360™ dans le support Bracket Pro Serie 221 pendant le transport de soins médicaux d'urgence ou des soins critiques. Pour obtenir des renseignements détaillés sur le produit qui ne sont pas liés à l'utilisateur, consulter votre superviseur ou le manuel de l'utilisateur au besoin.


REMARQUE : Effectuer toujours les vérifications de sécurité **avant** d'utiliser le support Bracket Pro Serie 221. Consulter les "Vérifications de sécurité quotidiennes" à la page 9 avant chaque utilisation.

REMARQUE : Technimount cherche continuellement à améliorer la conception et la qualité des produits. Bien que ce guide d'utilisation contienne les renseignements les plus récents sur le produit au moment de l'impression, il peut contenir des différences mineures avec la version actuelle. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse customerservice@technimount.com.

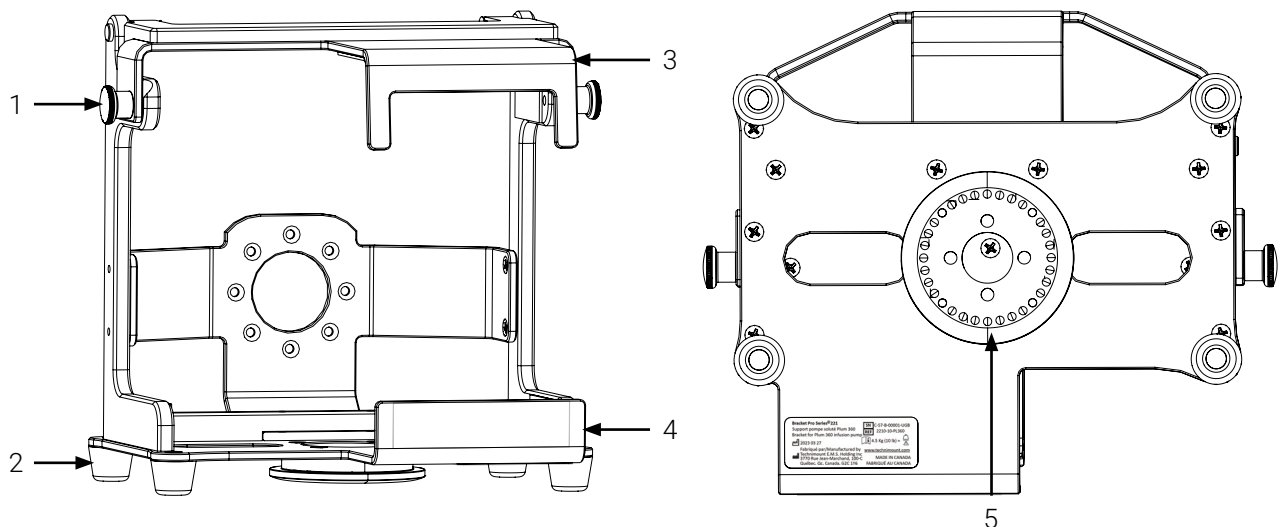

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Mécanisme à déclenchement rapide (2X) | 3. Dessus du support |
| 2. Pied (4X) | 4. Pli avant |
| | 5. Micro disque |

Figure 1: Support Bracket Pro Serie 221 avec disque inférieur (avant et dessous illustré)

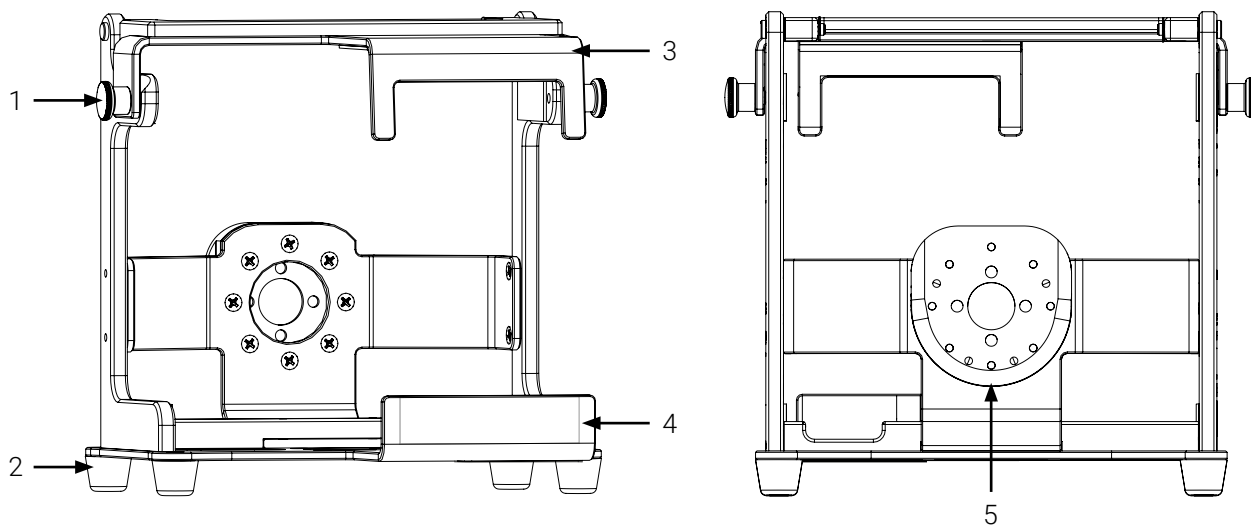

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Mécanisme à déclenchement rapide (2X) | 3. Dessus du support |
| 2. Pied (4X) | 4. Pli avant |
| | 5. Micro disque antirotation |

Figure 2: Support Bracket Pro Serie 221 avec disque arrière (avant et arrière illustré)

2.1. Installer le PLUM 360 dans le support Bracket Pro Serie 221

1. Si le support est fermé (barré), tirer les sur les 2 boutons du mécanisme à déclenchement rapide pour désengager le dessus du support, puis le lever jusqu'à sa position finale (Figure 3).

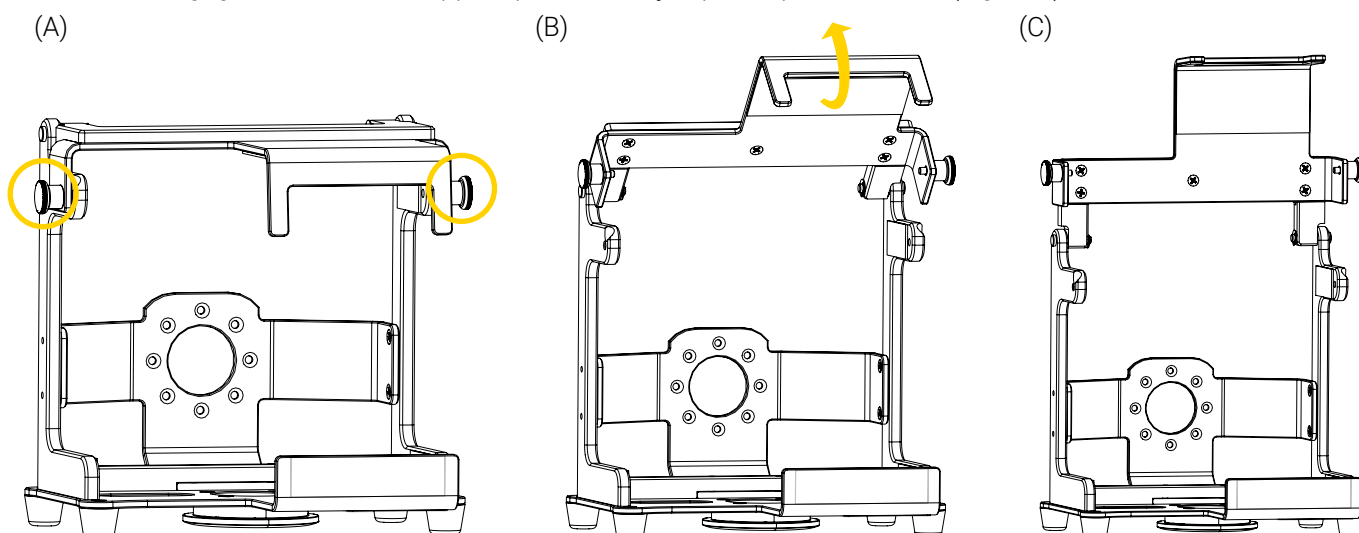


Figure 3: Débarrer/ouvrir le support Bracket Pro Serie 221

2. Insérer la pompe en angle dans le support, puis l'appuyer contre le pli avant du support et s'assurer qu'elle soit centrée dans le système de fixation (Figure 4 A et Figure 4 B).
3. Redresser la pompe dans le support (Figure 4 C).

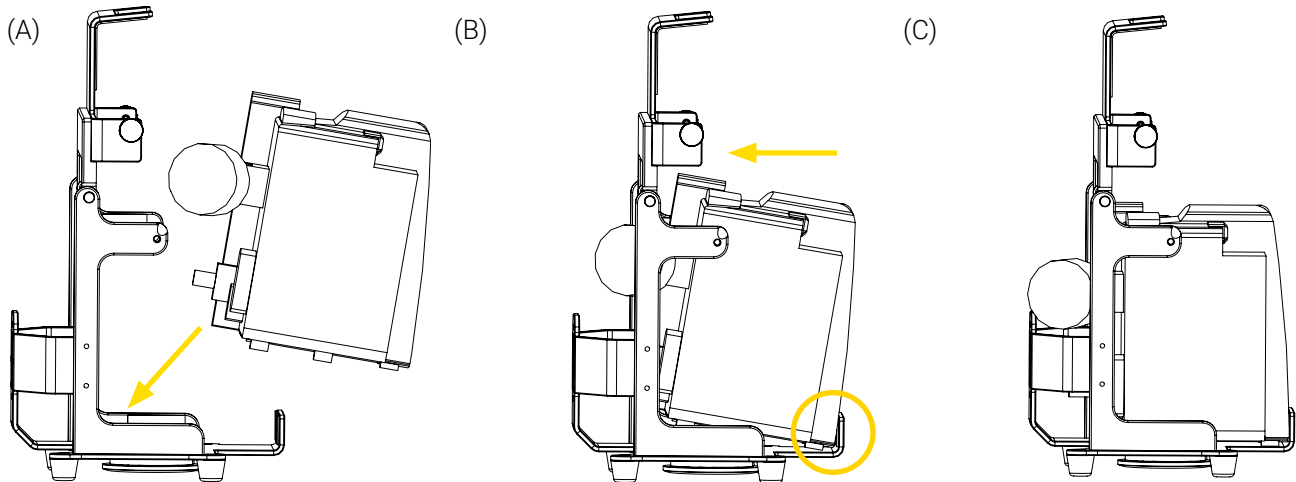


Figure 4: Installation du PLUM 360 dans le support Bracket Pro Serie 221

4. Baisser le dessus du support par dessus la pompe à infusion (Figure 5 A), puis appuyer jusqu'au son du clic du mécanisme à déclenchement rapide qui s'engage dans le support (Figure 5 B).
5. Bouger le dessus du support de haut en bas à quelques reprises et s'assurer que le support soit barré et que la pompe soit sécurisé dans le support.

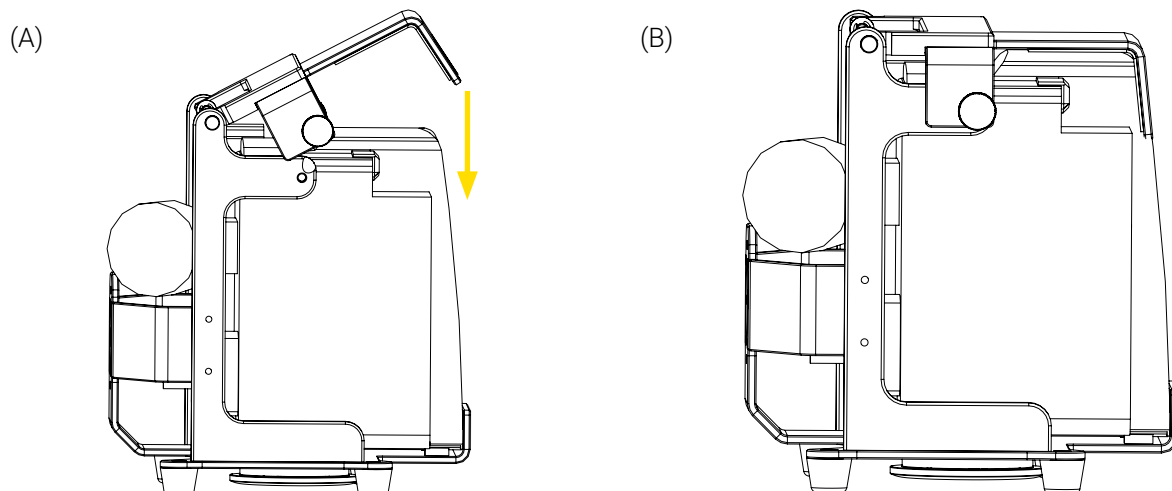


Figure 5: Pompe PLUM 360 installée dans le support Bracket Pro Serie 221

L'installation du PLUM 360 dans le support Bracket Pro Serie 221 est complétée.

2.2. Retirer le PLUM 360 du support Bracket Pro Serie 221

1. Au besoin, débrancher la pompe à infusion.
2. Tirer sur les 2 boutons du mécanisme à déclenchement rapide pour désengager le dessus du support (Figure 6 A), puis le lever jusqu'à sa position finale (Figure 6 B et Figure 6 C).

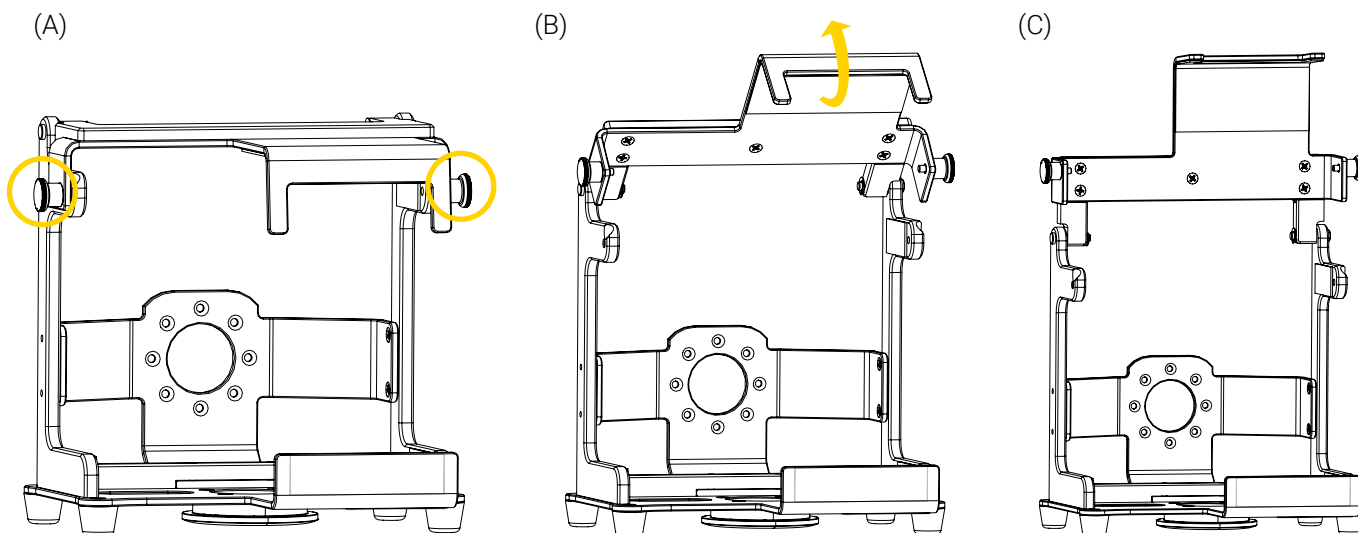


Figure 6: Retrait du PLUM 360 du support Bracket Pro Serie 221

3. Basculer la pompe vers l'avant, en angle sur le pli avant du support (Figure 7).
4. Tirer pour retirer la pompe du support (Figure 7 B et Figure 7 C), puis la mettre de côté.

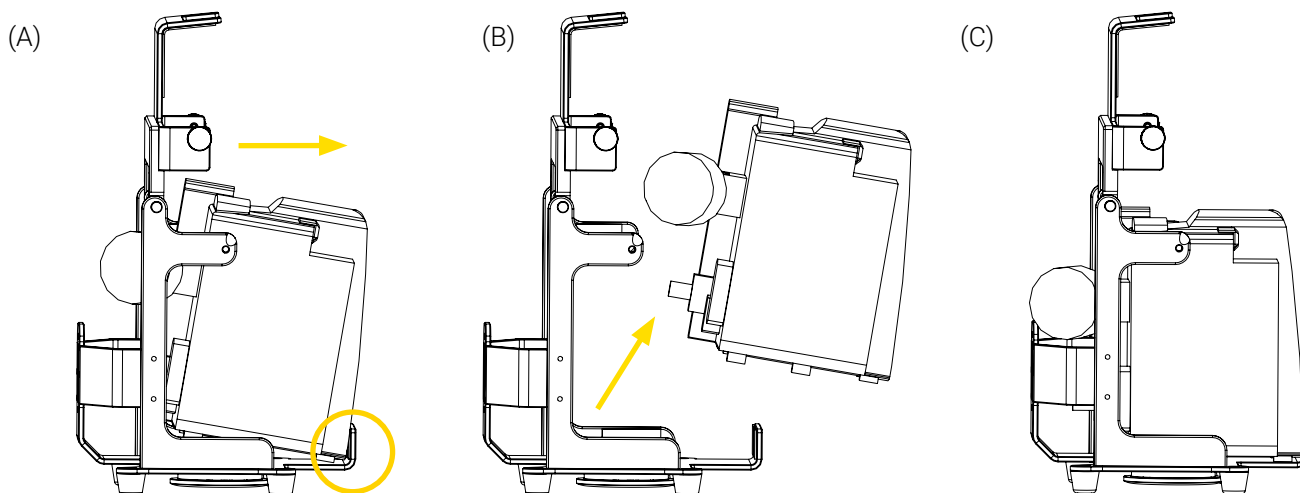


Figure 7: Pompe PLUM 360 retirée du support Bracket Pro Serie 221

Le retrait du PLUM 360 du support Bracket Pro Serie 221 est complétée.

3. Effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes

Des vérifications de sécurité quotidiennes sur les produits Technimount sont recommandées pour les garder en bon état et éviter toute défaillance ou blessure au patient ou au personnel des services médicaux d'urgence. Le personnel des services médicaux d'urgence doit effectuer les vérifications de sécurité quotidiennes au début de chaque quart de travail.

REMARQUE : Conserver toujours des dossiers de toutes vos activités de maintenance et retirer immédiatement les produits défectueux ou expirés de votre inventaire.

Communiquer avec le soutien technique à l'adresse techsupport@technimount.com pour tout problème lié aux pièces de rechange ou à la réparation.

3.1. Outils requis

- Linge sec et propre


3.2. Vérifications de sécurité quotidiennes

Voir en référence les points d'inspection illustrés (Figure 8 et Figure 9), au besoin.

REMARQUE : En cas de non-conformité, aviser le superviseur de la maintenance de toutes les non-conformités et cesser immédiatement l'utilisation.


VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ QUOTIDIENNES	CONFORME	
	OUI	NON
INSPECTION		
Support Bracket Pro Serie 221 (Figure 8 et Figure 9)		
- Inspecter visuellement le support pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommage ou d'attaque chimique, que le matériel est en bon état et qu'il n'y a pas de vis desserrées.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Inspecter visuellement le support et s'assurer qu'il n'y a pas de particules logées. Si c'est le cas, retirer immédiatement à l'aide d'un linge propre et sec.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dessus du support (Figure 8 et Figure 9)		
- Inspecter visuellement le dessus du support pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommage ou d'attaque chimique et que le matériel est en bon état.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tirer/relâcher les mécanismes à déclenchement rapide et vous assurer qu'il fonctionne correctement (verrouillé/déverrouillé). Le mécanisme devrait s'insérer et se retirer sans résistance.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Une fois déverrouillé, lever/descendre le dessus du support et s'assurer qu'il n'y aie pas d'interférence ni de particules logées. Si c'est le cas, retirer immédiatement à l'aide d'un linge propre et sec.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Baisser le dessus du support jusqu'à ce qu'il se verrouille, puis le tirer vers le haut pour vous assurer que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement. Si le mécanisme de verrouillage est défectueux, aviser le superviseur de la maintenance et cesser immédiatement l'utilisation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.3. Points d'inspection illustrés

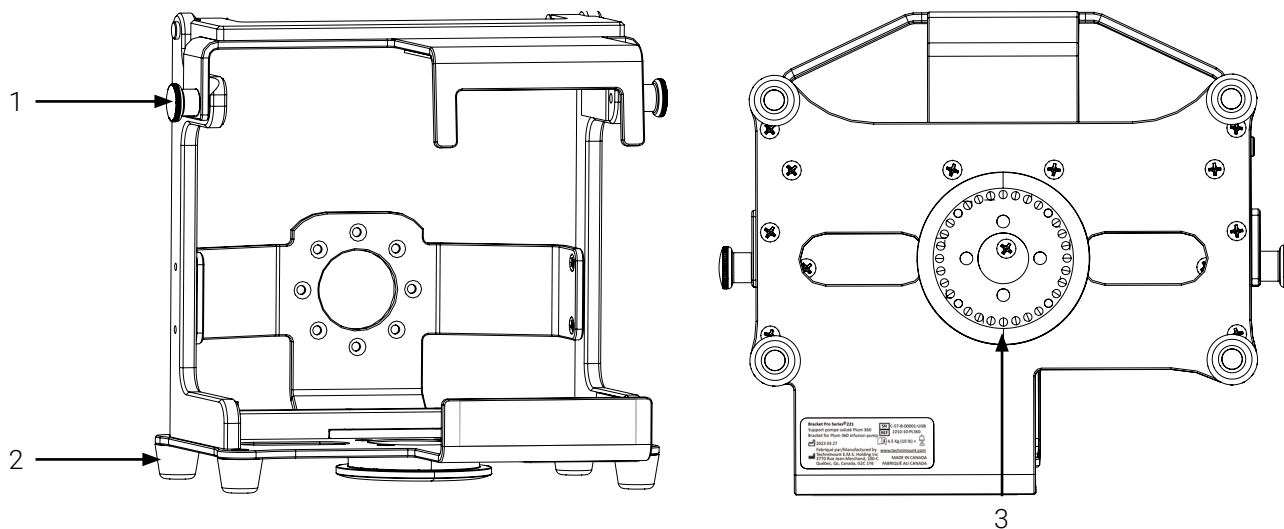


- 1. Mécanisme à déclenchement rapide (2X)
- 2. Pied (4X)
- 3. Micro disque

Figure 8: Support Bracket Pro Serie 221 avec disque inférieur (avant et dessous illustré)

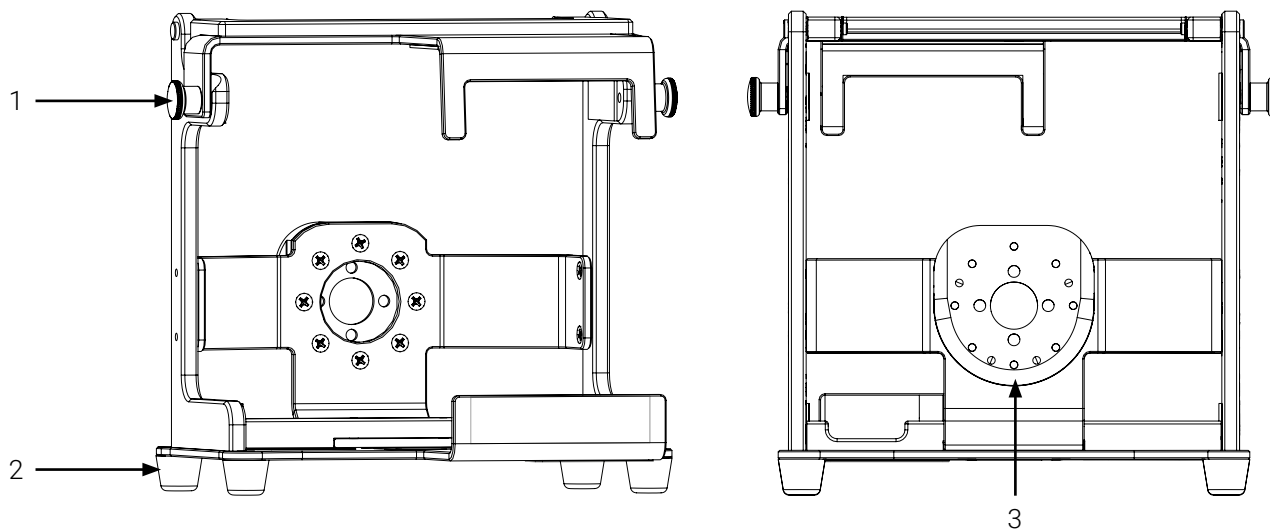

- 1. Mécanisme à déclenchement rapide (2X)
- 2. Pied (4X)
- 3. Micro disque antirotation

Figure 9: Support Bracket Pro Serie 221 avec disque arrière (avant et arrière illustré)

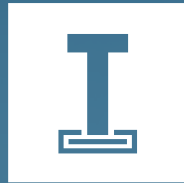

TECHNIMOUNT EMS[®]

Technimount EMS offre des solutions de fixation qui peuvent être installées sur les comptoirs d'ambulance, les murs et les civières, ce qui permet à l'appareil de suivre le patient tout au long du continuum de soins. Notre niveau de flexibilité inégalé permet une utilisation maximale dans les environnements de services médicaux d'urgence, hospitaliers et militaires.

Technimount EMS offre des solutions novatrices qui répondent aux besoins uniques en matière de gestion des appareils médicaux des équipes de transport d'urgence et de soins critiques pour les ambulances terrestres et aériennes. La sécurité est au cœur de nos valeurs; tous les systèmes Technimount sont testés conformément aux normes les plus élevées de l'industrie en matière de résistance aux impacts. Technimount EMS s'engage à fournir des solutions de transports innovantes pouvant s'adapter aux pratiques de soins en constante évolution.

GESTION TECHNIMOUNT S.A.M.U INC.

3770, rue Jean Marchand, bureau 100-C
Québec (Québec) G2C 1Y6
Canada
T + 1 581 700-6613
SF + 1 888 639-2758 (Amérique du Nord)

technimount.com